


medidas exactas al instante

El nuevo Avanzado Localizador Digital de Ápice de NSK ha sido desarrollado para medir con exactitud la longitud de los canales en todas condiciones, incluyendo la seca, la húmeda y donde esté presente la sangre.


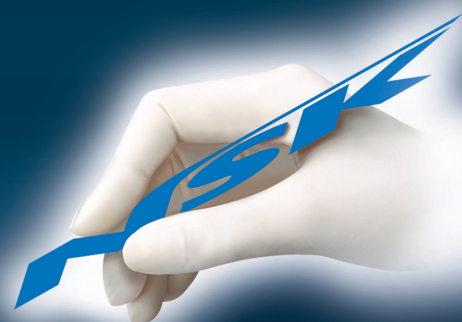


- Avanzado Localizador Digital de Ápice
- Interfaz Respetuoso del Usuario
- Gran Pantalla LCD para un Fácil Monitoreo
- Diseño Compacto y Pequeño
- Sistema Audible de Advertencia



Gran Pantalla LCD, Sumado a Señales Audibles para un Monitoreo Inmediato

La gran pantalla LCD permite inmediato y preciso monitoreo de la distancia apical. Gráficos respetuosos al usuario, sumado a señales audibles, proveen la información exacta requerida para la óptima posición de la lima cuando el instrumento se aproxima al ápice. El volumen de audio es ajustable.

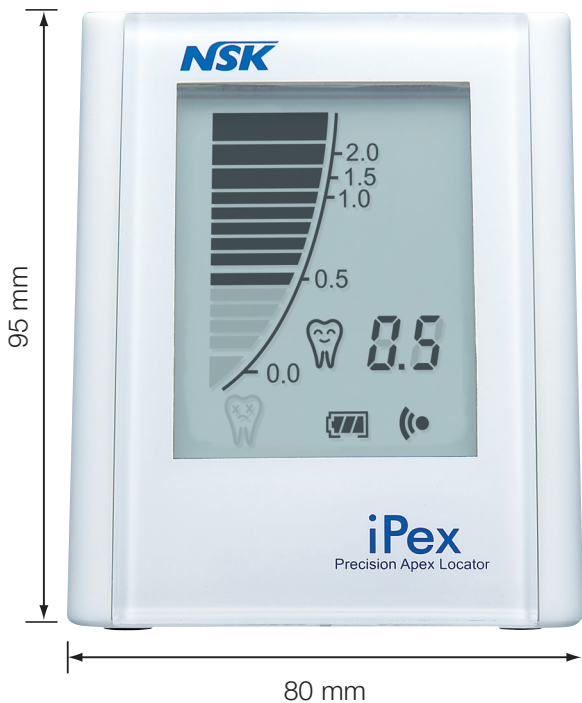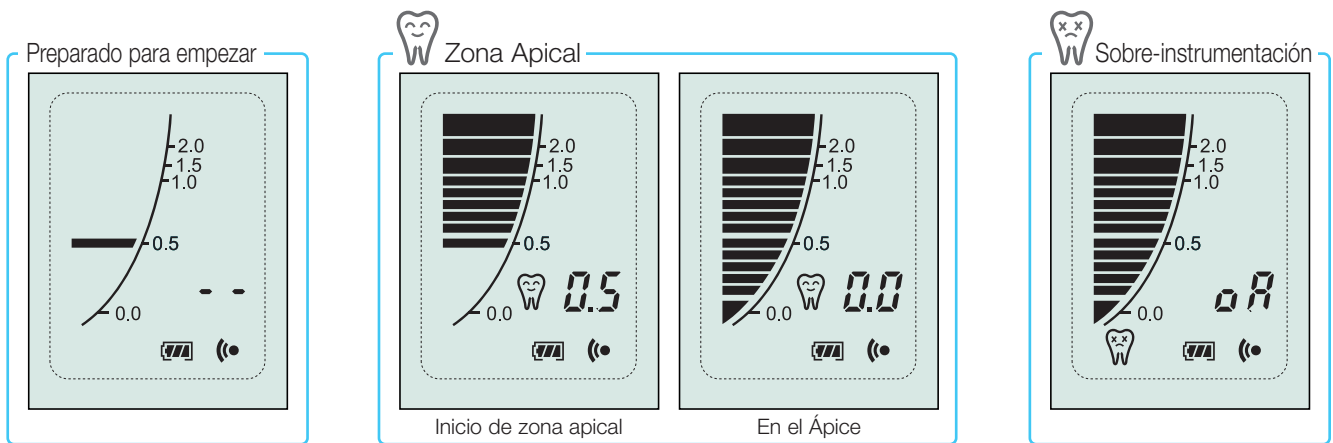

Preciso Localizador Digital de Ápice

El nuevo Localizador Digital de ápice de NSK asegura gran exactitud en toda condición del canal y elimina los problemas que aparecen en otros localizadores de ápice que usan señales análogos. Gracias a la tecnología software de medición multi-frecuencial, el iPex de NSK filtra las señales irrelevantes que pueden aparecer en canales curvados o bajo otras circunstancias extraordinarias. iPex también selecciona automáticamente las mejores combinaciones posibles de frecuencia al conocer la condición del canal del paciente.

- **Apagado Automático de Encendido**
iPex se apaga automáticamente después de inactividad de 10 minutos
- **Sistema Audible de Advertencia**
Una señal audible informa al usuario sobre el progreso de la lima dentro del canal
- **Sin Calibración Manual**
- **Operado por Pilas Recargables AAA**



iPex Set Completo

MODELO	CÓDIGO PEDIDO
iPex	Y141-251

Contenido

- Unidad iPex • Sonda • Cable extensión • Gancho labial (3 unid.)
- Clip para limas (3 unid.) • Pilas secas de Manganeseo AAA (4 unid.)

Especificaciones

- Fuente de Alimentación : 1.5V pilas AAA (LR03 ó R03)
- Uso Continuo : aproximad. 50 horas • Dimensiones : W80 x D80 x H95 (mm)
- Peso : Unidad control 185g

NSK NAKANISHI INC.

HEAD OFFICE
700 Shimohinata, Kanuma,
Tochigi 322-8666, Japan
TEL : +81 (0)289-64-3380
FAX : +81 (0)289-62-5636
www.nsk-inc.com

TOKYO OFFICE
6F MY Building, Ueno 1-13-3,
Taito-ku, Tokyo 110-0005, Japan
TEL : +81 (0)3-3835-2892
FAX : +81 (0)3-3835-2856

NSK Europe

Westerbachstraße 58 D-60489 Frankfurt, Germany
TEL : +49 (0)69 74 22 99 0 FAX : +49 (0)69 74 22 99 29
www.nsk-europe.de

NSK Middle East

Dubai Airport Free Zone, Room 2W-310, 3F West Wing, Dubai, UAE
TEL : +971-4-299-6644 FAX : +971-4-299-6664



Expect Perfection®